

Sådan skifter du elektrode på din ZOLL AED Plus hjertestarter




1 Placér hjertestarteren på et plant underlag foran dig.



2 Løft låget af hjertestarteren.



3 Tag fat i det hvide stik og træk det ud.

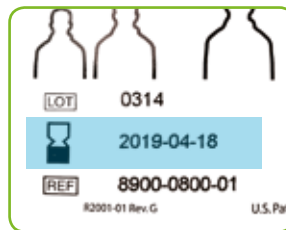

4 Tag den nye elektrode ud af papkassen og kontrollér elektrodens udløbsdato ved det lille timeglas.



5 Tilslut den nye elektrode i stikket. Tryk hårdt.



6 Fold eventuelt hjørnerne på elektrodepakningen ind, så den kan være i låget.



7 Skub den gule snip ud gennem slidsen i låget.



8 Sæt låget på hjertestarteren.

Elektroden er nu skiftet og hjertestarteren er klar til at få skiftet batterier.

Vend for vejledning.

Sådan skifter du batterier på din ZOLL AED Plus hjertestarter



- 1 Vend hjertestarteren, så bagsiden vender opad.



- 2 Brug en mønt eller nøgle til at trykke de to riller ind på batteridækslet.
Brug samtidig den anden hånd til at klikke låget af.




- 3 Tag dækslet af og fjern de gamle batterier.

Isæt nye batterier. Sørg for at de sidder korrekt, og polerne vender rigtigt.



Alle 10 batterier **SKAL** udskiftes **samtidig**. Brug kun Duracell eller Power One batterier. Brug **IKKE** Panasonic, Varta eller Rayovac batterier.

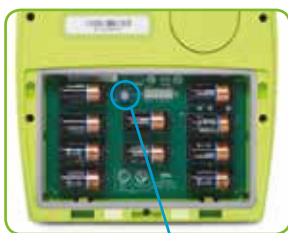

- 4 Når de nye batterier er isat, vil hjertestarteren efter kort tid bede dig om at trykke på batteri-nulstillings-knappen.

Tryk på nul-stillings-knappen, inden for 15 sekunder, når du hører beskeden: **"hvis batterier er nye, tryk på knappen"**.

Hvis elektroden ikke er isat, vil hjertestarteren minde dig om det med beskeden: **"isæt ledning"**.



- 5 Batteridækslet klikkes/sættes på plads.



- 6 Kontrollér, at der vises et grønt flueben ✓ i indikatorvinduet.

Hjertestarteren er nu klar til brug. Batterier og elektrode har 5 års holdbarhed i standbytid.

www.hjertevagt.dk